

plum

Plum Ögonskölj

Ögonskölj



Plum Ögonskölj innehåller 0,9 % steril natriumklorid motsvarande det naturliga saltinnehåll som ögat själv producerar. Den isotoniska lösningen är speciellt lämplig till att skölja och rensa ögat vid snabb förstahjälps där t ex damm eller smuts kommit in i ögat. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp som säkrar att vätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Plum DUO flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att du kan skölja båda ögonen samtidigt. Ögonsköljsflaskorna är CE-märkta med hänsyn till gällande regler för medicinsk utrustning.

Användningsområde

Plum Ögonskölj används för att skölja bort främmande partiklar i ögat, t ex damm, smuts, metall- och träspån samt kemikalier som t ex olja och lösningsmedel. En sköljning kan förebygga att dessa partiklar och kemikalier orsakar allvarliga skador på ögat.

Vid skador med syror och baser rekommenderar vi vår sterila pH Neutral, som är en 4,9 % fosfatbuffer som snabbt och effektivt neutraliserar mycket starka syror och baser. Efter användning av pH Neutral rekommenderar vi fortsatt sköljning fram till läkarbesök med Plum Ögonskölj 0,9 % natriumklorid. Notering: Sök läkare vid alla ögonskador!

Produktegenskaper

Rekommenderad sköljtid:

200 ml: 2 min
500 ml: 5 min
1000 ml: 10 min
3 x 500 ml: 15 min

Bruksanvisning

Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utgångsdatum (se etikett). Använd inte produkten om flaskans försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns det risk för infektion vid användning! Förvaras i 5-35 grader.

Rekommenderad sköljtid:

200 ml: 2 min
500 ml: 5 min
1000 ml: 10 min
3 x 500 ml: 15 min

Tillverkningsland

DANMARK

**Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.****Artikelnr.****GTIN****GTIN (krt)**

6 x 1 l

4707

5715205470729

5715205470712

10 x 200 ml

4691

5715205469129

5715205469112

12 x 500 ml

4604

5715205460423

5715205460416

**Ytterligare
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.