



Antibac Ytdesinfektion

Ytdesinfektionsservett



Antibac® ytdesinfektion 75% torkdukar och servetter har en dokumenterad effekt på bakterier, olika virus och jästsvampar, och används på alkoholbeständiga ytor. Vätskan ger inte resistenta bakterier och lämnar inga ämnen på ytan efter avdunstning. Verkningsstid: minst 1 minut.

Användningsområde

Dukarna och servetterna har utvecklats för desinfektion av ytor, möbler och liknande inom områden: vården, tandvården, livsmedelsindustrin, catering, förskolor, skolor och kontor.

Dukarna och servetterna är väl lämpade för bland annat desinficering av bänkar, bord, produktionsutrustning och redskap.

Produktgenskaper

Servetterna i rör är 20 x 20 cm och varje rör innehåller 150 servetter.

De singelpackade servetterna mäter 17 x 22 cm. Levereras i en praktisk och lättanvänd displaybox om 150 singelförpackade servetter.

Testdokumentation: EN 13727 bakterier, EN 13624: jäst, EN13697: bakterier och jäst, EN 14476: höljeförsedda virus, EN 14348 mykobakterier, EN 16615: bakterier och jäst.

Verkningsstid: minst 1 minut.

Bruksanvisning

Gnid duken / servetten över ytan så att den är fuktig i minst 1 minut. Om avdunstning sker snabbare måste proceduren upprepas. Produkterna används på alkoholbeständiga ytor som är torra och inte till ytan synligt smutsiga.

Sammansättning

Aktiva ämen

Denaturerad etanol 75%

Isopropylalkohol

Förpackningsvolym / Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

6 x 150 st

601150

7054956011507

7054957011506

150st
servetter/burk

6 x 150 st

603011

7054956030119

7054957030118

Singelförpackning

Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.