



Kiilto Pro Ytdesinfektion

75+

Ytdesinfektion



Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+ är baserad på 75 vol% denaturerad etanol samt tensid (smutslösare) och avsedd för desinfektion av släta ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbriter. Den är effektiv mot bakterier, jästsvamp och olika typer av virus som coronavirus, HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Produkten verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal effekt) 5 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN13697 (jästicidal effekt) 60 sek

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) - 2 min

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (mykobactericidal effekt) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde	Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården.	
Produktegenskaper	75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan Innehåller tensid, vilket gör att ytan inte behöver förbehandlas Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. Corona, HIV, Murine Norovirus och Adenovirus.	
Bruksanvisning	Används på ytor som tål alkohol. Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+ innehåller tensid vilket gör att ytan inte behöver rengöras först. Är ytan väldigt smutsig eller har mycket intorkat blod rekommenderas dock rengöring med vanligt rengöringsmedel först. Gör så här: 1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska. 2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se produktblad för kontakttider) 3. Lämna ytan att lufttorka	
Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Etanol	75vol% med tensid

Förvaring	Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppen flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Utgångsdatum står tryckt på flaskan.
Utseende och doft	Genomskinlig klar vätska, karakteristisk alkoholdoft.
Tillverkningsland	SVERIGE
Användar- och miljö säkerhet	Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Förpackningsmaterial	Flaska: HDPE plast Förslutning: PP plast Transportförp.: FSC-märkt kartong/pappersförpackning

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
	12 x 1 l	495-12	7331964004951	7331964904954
	1 x 10 l	497-1	7331964004975	
	24 x 300 ml	494-24	7331964004944	7331964904947



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.