

STERISOL Øyedusj

Egenskaper

Ulykker kan skje på et øyeblikk, og når det gjelder øyeskader, har man ofte bare én sjanse til å reagere riktig. Derfor er umiddelbar og pålitelig tilgang til en effektiv øyedusj helt avgjørende. Sterisol Øyedusj gir en skylletid på 12 minutter per flaske – en av de lengste på markedet – med en steril, isoton saltvannsløsning uten tilsetningsstoffer som borat og fosfat.

Utviklet for bruk både i det øyeblikket en ulykke inntreffer og under transport til medisinsk behandling, leverer 1-litersflasken en kontinuerlig, jevn strøm og trykk. Takket være det intuitive designet er den enkel å aktivere og bruke – selv i stressende situasjoner eller ved nedsatt syn – ved å slå av beskyttelseshetten, som bryter sikkerhetsforseglingen og starter skyllingen umiddelbart.



Bruk av Sterisol Øyedusj

Det er enkelt å ta flaskene ut av veggfestet og bruke dem til kontinuerlig skylling på vei til lege eller fast øyeskyllestasjon. Når en flaske er åpnet, skal den brukes umiddelbart og deretter kastes. Erstatt den med en uåpnet flaske! Sørg for å ha tilstrekkelig med reserveflasker på lager for påfyll ved behov!

- All væske treffer øyet med en kontinuerlig og jevn strøm.
- Én flaske varer lenge – 12 minutters skylling.
- Rask aktivering – et bestemt slag med hånden på beskyttelseslokket bryter sikkerhetsforseglingen.
- Enkel å ta med – for skylling av skadet øye under transport til fast øyeskyllestasjon eller lege.

Instruksjoner for bruk



Flasken må stå på en flat overflate. Slå hardt og bestemt med hånden på toppen av det grønne beskyttelseslokket!



Fjern det grønne beskyttelseslokket som nå har løsnet!



Åpne øyelokkene. Skyll med hodet lent bakover! Flasken plasseres slik at skylleskoppen hjelper til med å holde oppe øyelokkene. Væsken skal renne av seg selv.

Tenk på at!

Når et skadelig stoff har kommet i øyet, er det spesielt tre viktige ting å huske på:

- Skyllingen må starte umiddelbart for å unngå alvorlige skader. Skyll kontinuerlig, også under transport til fast øyeskyllestasjon eller lege!
- Skyllingen må pågå lenge. Tiden varierer avhengig av hvilket stoff som har kommet i øyet. La legen avgjøre når skyllingen skal stoppe! Sørg derfor alltid for å ha flere ekstra flasker tilgjengelig for skylling under transport.
- Ofte må begge hendene være fri for å holde øyelokkene adskilt. Kall derfor raskt på hjelp!

Innhold

1 liter steril isoton natriumklorid-løsning (0,9 %).
Skyllingstiden er ca. 12 minutter.

Holdbarhet

En "brukes før-dato" er tydelig skrevet på hver flaske. Etter denne datoen bør flaskene byttes ut, for at Sterisol AB skal garantere at innholdet er egnet for øyeskylling.

Smidig flaske

Den 1-liters flasken er lett å ta ut av sitt veggfeste eller stativ og gir en kontinuerlig, jevn skylling av øyet. Takket være det intuitive designet er den enkel å bruke, selv i stressende situasjoner eller når synet er nedsatt.

Fri for tilsetningsstoffer

Vår øyedusj er helt fri for tilsetningsstoffer som borat og fosfat, noe som gjør den skånsom og sikker for øynene. Den er designet for å gi effektiv lindring uten unødvendige kjemikalier, og er et trygt valg både ved nødsituasjoner og daglig bruk.

CE-merking

Sterisol Øyedusj har CE-merket på etiketten. Det betyr at kravene i EUs direktiver for produksjon av medisinsk utstyr er oppfylt. Øyeskyllen er kategorisert i klasse 1, steril, og har derfor blitt vurdert av et såkalt tredjepart-organ.

Medisinsk utstyr

Sterisols kvalitetssystem for produksjon av medisinsk utstyr er i samsvar med MDR-forskriften (Medical Device Regulation EU) 2017/745. MDR stiller høye og tydelige krav til produsenter for at brukere skal få tilgang til trygge og effektive produkter. Forskriften klargjør også de forpliktelsene som importører og distributører har.

Produkt	Art nr	Antall i kartong	Antall forp/pall	Antall per pall	EAN-kod
1 l Øyedusj-refillflaske	4651	10	21	210	7392173046514
1 l x 2 stk Øyedusj i bærbart stativ	4655	5	21	105	7392173046552

Symbolforklaringer

Etiketten på Sterisol Øyedusj er utstyrt med de symbolene som EU-direktivene forskriver.

Her er forklaringer på symbolene:

Sterisol

ØYEDUSJ

1

SLÅ!
Med et hardt støt, på et jevnt underlag!

2

3

FJERN!
Fjern hetten

4

SPYL!
Væsken skal renne av seg selv

Oppsøk lege!
Overskytende væske skal kastes.
Sorteres som plastavfall.
Koksaltesning: 0,9%
Innhold: 1L

Sterisol AB
Kronängsg 3
SE-59230 Vadstena
Sweden
+46 143 768 68
www.sterisol.se

Importer:
Puls as
Postboks 77
1008 Oslo
Norway
23 32 30 00

CE
NB2460

STERILE

MD XXXXX

LOT XXXX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX

UDI

XXXXXXXXXXXXXX

STERILE

Sterilisert med damp eller tørr varme.



Oppfyller kravene i EUs direktiver for medisinsk utstyr.

NB2460

Kontrollorganets nummer.



Kun til engangsbruk.



Følges av tall som betegner produksjonsbatchens nummer.



Produksjonsdato. Angis med fire sifre for året og to sifre for måned og dag, for eksempel 2016-06-02.



Brukes før-dato. Angis kun med år og måned. Eksempel: 2016-05.



Produsent.



Temperatur som produktet skal oppbevares ved.



Medisinsk utstyr.



QR-kode med sporbarhet for produktet.

Slik behandler du

Skader forårsaket av alkaliske stoffer

Når alkaliske stoffer – som for eksempel lut, kaustisk soda, ammoniakk, aminer, brent kalk og maskindiskmiddel – kommer i kontakt med øyet, kan det føre til alvorlige skader. De trenger raskt dypt inn i øyet. Enkelte alkaliske stoffer, som for eksempel ammoniakk, har blitt funnet i øyets indre allerede etter 25 sekunder. Uten umiddelbar skylling kan skadene bli omfattende og føre til tap av synet. Øyeskyllingsutstyr bør derfor være lett tilgjengelig på armlengdes avstand og lett kunne tas med under transport til lege.

Tiltak:

- Skyll øyet umiddelbart og fortsett med skyllingen under transport til sykehus.
- Hold øyelokket godt åpent under skyllingen.
- La lege avgjøre når skyllingen skal stoppe.

Skader forårsaket av syrer og andre irriterende stoffer

Syresprut i øyet medfører risiko for etseskader og arrdannelse, som kan føre til nedsatt syn. Syre påvirker hornhinnens proteiner. Disse koagulerer og danner en beskyttelsesbarriere. Barrieren forsinker syren fra å trenge dypere inn i øyet, men umiddelbar skylling er nødvendig.

Tiltak:

- Skyll øyet umiddelbart og fortsett med skyllingen under transport til sykehus.
- Hold øyelokket godt åpent under skyllingen.
- La lege avgjøre når skyllingen skal stoppe.

Mekaniske skader

Mekaniske skader forårsakes av fremmedlegemer som støv, spåner og skitt. Eksempler på dette er metallspåner, som kan forårsake sviing, smerte og arrdannelse, med en viss synsnedsettelse som følge.

Tiltak

- Skyll øyet umiddelbart til fremmedlegemet er fjernet.
- Hold øyelokket godt åpent under skyllingen.
- Oppsøk lege hvis smerte eller irritasjon vedvarer.