

plum

WipeClean Ethanol and Surfactant Mini

Desinfektionsservett

**CE**
2797

Engångsduk för enkel och snabb desinfektion av ytor som tål alkohol. Rengör och desinficerar i ett arbetsflöde.

Användningsområde

För ytdesinfektion av non-invasiva medicintekniska produkter som tål alkohol. Utvecklad för användning inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Lämplig för användning inom hälso- och sjukvården, tandkliniker, sterilcentraler etc.

Produktegenskaper

Engångsservetter för enkel och snabb ytdesinfektion. Servetterna innehåller rätt mängd desinfektionsmedel och är redo att användas direkt från förpackningen. Innehåller 75 % denaturerad etanol (denaturerad med IPA) och tensid. Detta innebär att ytan inte behöver rengöras före desinfektion. Synlig smuts bör dock avlägsnas före användning. Oparfymrad.

De mjuka och följsamma servetterna är tillverkade av 40 % viskos och 60 % PET och är utformade för att lämna vätskan kvar på ytan. Detta uppnår största möjliga desinfektionseffekt.

Bruksanvisning

Servetterna är bruksklara och ska användas på synligt rena och torra ytor. Ta ut en servett ur förpackningen, bearbeta ytan för att hålla den fuktig enligt kontakttiden för optimal effekt, kassera den. Stäng alltid förpackningen efter användning. Ej avsedd för handhygien. Använd handskar i enlighet med EN374.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN16615	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min (dirty)
EN13727	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min (dirty)
EN13697	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	1 min (dirty)
EN13697	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min (dirty)
EN13624	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min (dirty)
EN13624	Yeasticidal activity	C. albicans	1 min (dirty)
EN16615	Yeasticidal activity	C. albicans	1 min (dirty)
EN14348	Mycobactericidal activity	M. terrae M. avium	1 min (dirty)
EN14476	Limited spectrum virucidal activity	Adenovirus M. norovirus	1 min (clean) 5 min (dirty)

Sammansättning

Aktiva ämen	Effekt
Denaturerad etanol 75 %	Verksamma ämnen

Förvaring

Förvaras torrt, frostfritt och ej i direkt solljus.
Hållbarhet: 24 månader från produktionsdatum, 1 månad från öppnandet.

Utseende och doft

Utan färg och parfym.

Tillverkningsland

STORBRITANNIEN

Användar- och miljösäkerhet

MDR-medicinteknisk produkt. För professionellt bruk. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på www.kiilto.se.

Använda våtservetter kastas i hushållsavfalet. Oanvänd produkt kasseras som farligt avfall.

Förpackningsmaterial Emballaget runt servetterna är gjort av PET/PE plast och sorteras som plast, transportförpackningen som kartong.
Använda servetter slängs i hushållsavfallet.
Oanvänd produkt sorteras som farligt avfall.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)	Förpackning
	12 x 100 st	5261	5701684526125	5701684526118	Servett



Utrustning WipeClean Ethanol and Surfactant Mini 4114 Vägghållare till WipeClean förpackning

Ytterligare information Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.