

plum

WipeClean Ethanol med tensid

Desinfektionsklud

**CE**
2797

Engangsklud til nem og hurtig desinfektion af overflader, der tåler alkohol. Rengør og desinficerer i én arbejdsgang.

Anvendelsesområde

Til overfladedesinfektion af ikke-invasivt medicinsk udstyr, der kan tåle alkohol. Udviklet til brug i sundhedssektoren.

Produktegenskaber

Engangsklud til nem og hurtig overfladedesinfektion. Kludene indeholder den rette mængde desinfektionsvæske og er klar til brug lige fra pakken. Indeholder 75% denatureret ethanol (denatureret med IPA) og tensid. Det betyder, at overfladen ikke skal rengøres inden desinfektion. Synligt snavs bør dog fjernes inden brug. Uparfumeret.

De bløde og behagelige klude er fremstillet af 40% viscose 60% PET, og er designet til at efterlade væsken på overfladen. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

Kludene er pakket i lufttætte forpackninger med nem lukning som sikrer, at de ikke tørrer ud. Kludene er både kryds- og z-foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis, foldet og klar til brug.

Ethanol Disinfection med Tensid findes i følgende størrelser:
5261 Mini: 20 x 20 cm. rækker til 0,5 m².

Opfylder kravene i EN14885 og har dokumenteret baktericidal, mykobactericidal, fungicidal og virucidal effekt bl.a. mod Coronavirus og M. norovirus.

CE mærket. Vurderet af CEI til Intermediate level.

pH: 5,5 – 6,5 (brugsopløsning)

Brugsanvisning

Kludene er klar til brug og skal anvendes på synligt rene og tørre overflader. Tag en klud ud af pakken, bearbejd overfladen så den holdes fugtig i henhold til kontakttid for optimal effekt, smid ud. Luk altid emballagen efter brug.

Ikke beregnet til håndhygiejne. Anvend handsker i henhold til EN374.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN16615	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min (dirty)
EN13727	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min (dirty)
EN13697	Bactericidal activity	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	1 min (dirty)
EN13697	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min (dirty)
EN13624	Fungicidal activity	A. brasiliensis C. albicans	2 min (dirty)
EN13624	Yeasticidal activity	C. albicans	1 min (dirty)
EN16615	Yeasticidal activity	C. albicans	1 min (dirty)
EN14348	Mycobactericidal activity	M. terrae M. avium	1 min (dirty)
EN14476	Limited spectrum virucidal activity	Adenovirus M. norovirus	1 min (clean) 5 min (dirty)

Indhold

Ingrediens	Effekt
Denatureret ethanol	75 % Aktive stoffer

Opbevaring

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, 1 måned fra åbning.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

STORBRITANNIEN

Anvendelses- og miljøsikkerhed

MDR medicinsk udstyr. Til professionel brug. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på www.kiilto.dk.

Emballagematerialer

Folien er fremstillet af PET/PE-plast og sorteres som plastik, transportemballagen sorteres som pap. Brugte servietter sorteres som restaffald. Ubrugte produkter sorteres som farligt affald.

Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Forpakning
--	------------	------	-------------------	------------

12 x 100 stk	5261	5701684526125	5701684526118	Klude
--------------	------	---------------	---------------	-------

**Standard tilbehør**

WipeClean Ethanol and Surfactant Mini

4114 Vægholder til WipeClean emballage

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.